



Produktkatalog

Inkontinens-, hygiene- og hudpleieprodukter



De fleste lekkasjene skyldes feil valg av størrelse

Inkontinensbeskyttelse som sitter dårlig lekker. Derfor har vi utviklet et bredt produktsortiment tilpasset forskjellige kroppsformer og størrelser, i tillegg til varierende absorpsjonskapasitet. Som verdens ledende leverandør av inkontinenshjelpemidler leverer vi alt fra små "aerobicsinnlegg" som TENA Lady Mini Magic, til produkter som TENA Pants og TENA Flex for tung inkontinens. Samtlige av våre produkter er tilgjengelige gjennom faghandel (apotek og bandagist) for forbruker og hjemmesykepleien, og via anbud mot institusjoner og sykehus.

Velg riktig produkttype og absorpsjonsnivå

Alle pakningene er merket med et antall dråper som betegner absorpsjonskapasitet - jo flere dråper, jo høyere absorpsjon. Et bevisst forhold til ønsket absorpsjonsgrad, og ønsket varighet på beskyttelsen, vil gi mer fornøyde brukere, og mindre belastning på miljøet som følge av at færre unødvendige lekkasjer oppstår.

Dråpesystemet bidrar til at det blir enklere for ansatte i faghandel å gi riktig veiledning til kundene, og til at helsepersonell velger riktig produkt.

Velg riktig størrelse

Mål alltid livvidden før valg av produktstørrelse der livvidden er avgjørende. Livvidden er angitt på pakningen. Beskyttelse med feil passform og størrelse i forhold til brukeren forårsaker mange unødvendige lekkasjer, med alt det fører med seg av økte skiftkostnader. Riktig størrelse reduserer antall lekkasjer og forebygger også hudproblemer.

Frigjør tid ved inkontinenspleien

TENA Services er vårt eget utviklede bleieoppfølgingsprogram som frigjør ressurser for institusjonene. Det kartlegger og forbedrer inkontinenspleien helt ned på beboernivå. Kartleggingen skjer gjennom dialog med avdelingene og støttes av TENA Index+, et dataprogram for oppfølging av bleieforbruk på individuelt nivå. Resultatene danner grunnlaget for et spesialtilpasset opplæringsprogram i regi av TENA. Færre lekkasjer gir ikke bare mer fornøyde beboere, men frigjør også tid til andre oppgaver.



Slik velger du riktig bleie

1 Mål og noter brukerens livmål (målet tas på hoftekammen)

2 Bestem riktig absorpsjonsnivå



Våtindikator – et trivselstiltak

Produktene som er beregnet for tyngre inkontinens har en våtindikator på utsiden. Dermed kan helsepersonell enkelt se når skift er påkrevet uten å forstyrre brukeren. Våtindikatoren bidrar også til å redusere antallet unødvendige lekkasjer.

TENA.no – en kilde til kunnskap om inkontinenshjelpemidler og pleie

På våre hjemmesider finnes seksjoner for brukere og helsepersonell. Den gir råd og informasjon som er til nytte i det daglige arbeidet med inkontinens. Hjemmesidene våre oppdateres kontinuerlig, og vi anbefaler at alle som arbeider med inkontinenspleie gjør seg godt kjent med innholdet.

SCA og Miljøet

TENA tar ansvar for miljøet og gjennomfører LCA (livssyklusanalyser) på alle våre inkontinensprodukter. For hvert tre som felles for å skaffe hovedråstoff til våre produkter, plantes tre nye. SCA har mottatt en rekke utmerkelse for vårt miljøengasjement, og World Wildlife Fund har kåret SCA til "The highest rated paper company in the world" i årene 2006, 2007 og 2008. For femte år på rad ble SCA i 2009 kåret til en av verdens 100 mest bærekraftige bedrifter av det kanadiske tidsskriftet Corporate Knights, basert på en undersøkelse utført av det etiske investeringsselskapet Innovest.

Gjennom TENA Services samarbeider vi også direkte med våre kunder om miljøforebyggende tiltak. Programmet reduserer ikke bare kostnadene for unødvendige lekkasjer, det sørger også for mindre avfall. Og når vi vet at en bleiemengde tilsvarende 800.000 avfallssekker må håndteres årlig, har vi i fellesskap store muligheter til å spare miljøet. Et annet resultat av miljøsam arbeidet gjennom TENA Services, er at mengden vask av tøy og sengetøy reduseres i takt med unødvendige lekkasjer.

SCA Norge er Miljøfyrtårn- sertifisert.
Les mer på www.miljofyrtarn.no



INNHold

TENA Lady	side 4
TENA Men	side 5
TENA Flex	side 6
TENA Flex brukerveiledning	side 7
TENA Pants	side 8
TENA Comfort	side 9
TENA Slip	side 10
TENA Fix	side 11
TENA hygieneprodukter	side 12
TENA hudpleieprodukter	side 13
TENA seng- og stolbeskyttelse	side 14
Libresse, Libero	side 15
TENA sortimentoversikt	side 16

TENA Lady

Lett inkontinens

I bruk

TENA Lady er truseinnlegg og bind for kvinner som opplever dråpelekkasjer eller lett inkontinens. Produktene er tynne, diskrete, hudvennlige og gir effektiv beskyttelse. TENA Lady er spesielt velegnet for selvhjulpne kvinner som vil slippe å bekymre seg for lekkasjer eller lukt. Beskyttelsen festes til trusen ved å fjerne papirstrimlen på baksiden, og brukes sammen med tettsittende truser.

Produktegenskaper

TENA Lady finnes i 8 forskjellige absorpsjonsnivåer: TENA Lady Mini Magic, Ultra Mini, Mini, Mini Plus, Normal, Extra, Extra Plus og Maxi. Produktene absorberer urinen raskt, sprer og kapsler den inn i kjernen av produktet, slik at bindet føles tørt mot huden.

Alle TENA Lady inneholder Fresh Odour Control™ som hemmer utvikling av lukt. De minste innleggene er like tynne som et vanlig truseinnlegg.

Nyttig å vite

TENA Lady er enkeltpakket (gjelder ikke TENA Lady Mini Magic og Ultra Mini), noe som gjør dem hygieniske og diskrete i bruk.

Alle TENA Lady variantene, med unntak av TENA Lady Mini Magic, er godkjent på blå resept.



NAF nr.	Art.nr.	Produktnavn	Absorpsjons- evne	Antall Pose/Kart.	God- kjent av NAV
906079	761001	TENA Lady Mini Magic	▲▲▲	34/204	
983908	761130	TENA Lady Ultra Mini	▲▲▲	28/280	Ja
841767	760210	TENA Lady Mini	▲▲▲	20/200	Ja
901274	760301	TENA Lady Mini Plus	▲▲▲	16/160	Ja
901380	760401	TENA Lady Normal	▲▲▲	12/72	
921237	760406	TENA Lady Normal	▲▲▲	24/288	Ja
913427	760501	TENA Lady Extra	▲▲▲	10/60	
936346	760506	TENA Lady Extra	▲▲▲	20/240	Ja
816436	760603	TENA Lady Extra Plus	▲▲▲	16/96	Ja
839599	760906	TENA Lady Maxi	▲▲▲	12/120	Ja

TENA Men

Lett inkontinens

I bruk

TENA Men er diskrete og sikre innlegg for menn som opplever små drypplekkasjer eller lett inkontinens. Spesielt egnet for selvhjulpne menn som ønsker diskresjon i hverdagen.

Produktegenskaper



TENA Men finnes i to ulike absorpsjonsnivåer, Level 1 og Level 2. Passformen er tilpasset menn, og de er komfortable i bruk. TENA Men absorberer urinen svært godt, noe som reduserer muligheten for lekkasje til et minimum. Overflaten kjennes tørr og behaglig. Odour Control™ hemmer utviklingen av lukt. TENA Men har et stofflignende materiale på forsiden.

Nyttig å vite

TENA Men festes i underbuksen ved å fjerne papirstrimlen på baksiden. Bør brukes sammen med en tettsittende truse, som for eksempel TENA Fix Bomull Special som er godkjent på blå resept. Produktene er individuelt pakket i grå poser, for diskresjon og hygienisk bruk.

TENA Men er godkjent på blå resept.



NAF nr.	Art.nr.	Produktnavn	Absorpsjons- evne	Antall Pose/Kart.	God- kjent av NAV
899314	750651	TENA Men Level 1		24/144	Ja
921035	750750	TENA Men Level 2		20/120	Ja

TENA Flex

Middels/tung inkontinens

I bruk

TENA Flex er en beltebleie som tilpasses brukerens livvidde. FeelDry™ – overflaten sørger for at bleien føles tørr og behagelig. Bleien er enkel å skifte, og derfor arbeidsbesparende for pleiepersonalet. Forutsatt valg av riktig størrelse er den meget lekkasjesikker og komfortabel. TENA Flex er et meget godt alternativ for dem som bruker todelt løsningsalternativ som TENA Comfort og alt-i-ett produkter som TENA Slip. Produktet er selvfikserende.

Produktegenskaper

TENA Flex er en 100% pustende beltebleie som holder brukeren tørr og trygg. TENA Flex dekker en vesentlig mindre del av kroppen enn alt-i-ett produkter. Den ergonomiske utformingen gjør den enklere å skifte, og den gir mindre belastende arbeidstillinger for personalet*. ComfiStretch™-beltet gir god komfort og sikkerhet, da elastikken i beltet følger kroppens bevegelser, og holder bleien på plass. TENA Flex finnes i 3 forskjellige

absorpsjonsnivåer, Plus, Super og Maxi. Produktet leveres i flere livvidder, fra 60cm – 150cm, for optimal passform og lekkasjesikkerhet.

Nyttig å vite

TENA Flex har våtindikator som endrer farge fra gul til blå når det er på tide å skifte produkt. Se på brukerveiledningen på neste side for å lære hvordan TENA Flex enkelt kan skiftes. TENA Flex tilhører den nye generasjonen inkontinensprodukter som både er hudvennlige og bidrar til høy lekkasjesikkerhet og redusert ryggbelastning for personalet. Samtidig er TENA Flex både miljøvennlig og bidrar til bedre inkontinenspleie til en lavere total kostnad.

- Kartongene har bærehåndtak
- TENA Flex Small er et godt alternativ for sengevætere
- TENA Flex er godkjent på blå resept

*Kilde: Universitetet i Linköping, Sverige



NAF nr.	Art.nr.	Produktnavn	Absorpsjons- evne	Livvidde	Farge- kode	Antall Pose/Kart.	God- kjent av NAV
902162	723128	TENA Flex Plus Small		60-85 cm		28/84	Ja
921618	723230	TENA Flex Plus Medium		70-105 cm		30/90	Ja
913716	723330	TENA Flex Plus Large		80-125 cm		30/90	Ja
839686	724130	TENA Flex Super Small		60-85 cm		30/90	Ja
816980	724230	TENA Flex Super Medium		70-105 cm		30/90	Ja
899263	724330	TENA Flex Super Large		80-125 cm		30/90	Ja
868296	724430	TENA Flex Super X-Large		105-155 cm		30/84	Ja
913794	725121	TENA Flex Maxi Small		60-85 cm		21/63	Ja
898868	725222	TENA Flex Maxi Medium		70-105 cm		22/66	Ja
867956	725322	TENA Flex Maxi Large		80-125 cm		22/66	Ja
921675	725421	TENA Flex Maxi X-Large		105-155 cm		21/63	Ja

TENA Flex

Brukerveiledning

Før du tar den på




Brett ut bleien og løsne de to beltestykkene.



Dra også ut bleiens forside.


Stående

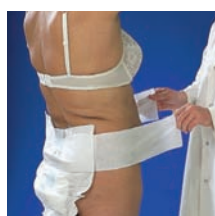

1. Før beltet rundt livet, og fest det med borrelåsen.



2. Trekk bleien ned, frem og opp mellom bena. Da får den en naturlig skålform.

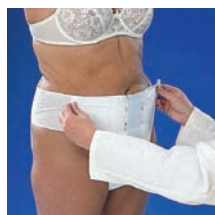

3. Fest bleien til beltet med borrelåsene. Prøv å få borrelåsen rett på beltet, og ikke strekk bleien langt ut mot hoftene.

Liggende



1. Snu pasienten over på siden. Før den ene beltedelen inn under kroppen, og bleien inn mellom bena.



2. Snu pasienten over på ryggen, og fest beltet med borrelåsen. Trekk bleien frem og opp mellom bena.



3. Fest bleien til beltet med borrelåsene.

Sittende



1. Før beltet rundt livet, og fest det med borrelåsen.



2. Trekk bleien ned, frem og opp mellom bena. Da får den en naturlig skålform.



3. Fest bleien til beltet med borrelåsene. Det er viktig at den sitter tett i lysken.

Bak frem



1. Stå bak pasienten. Fest beltet rundt livet med borrelåsen bak.



2. Trekk bleien ned, bakover og opp mellom bena.



3. Fest bleien til beltet med borrelåsene. Denne metoden egner seg godt ved skift på toalett eller andre steder enn i seng.

Etter at du har tatt den på

Pass på at bleien sitter godt og behagelig. Om den ikke sitter tett i lysken, fest beltet høyere opp rundt livet.

TENA *Pants*

Middels/tung inkontinens

I bruk

TENA *Pants* både ser ut og fungerer som undertøy, og tas av og på som en vanlig truse. Dette gjør produktet spesielt egnet til selvhjulpne brukere. Fordi TENA *Pants* fungerer og føles som en vanlig truse, er den også svært velegnet for personer med demens og giktplager, samt urolige personer og de som har problemer med å håndtere både bind/bleie og truse samtidig. Produktet kan brukes av kvinner, menn og barn.

Produktegenskaper

TENA *Pants* finnes i 3 ulike absorpsjonsnivåer, Discreet, Plus og Super, noe som gjør at TENA har det bredeste sortimentet av buksebleier på markedet. TENA *Pants* Discreet er beregnet på middels inkontinens, TENA *Pants* Plus for middels til tung inkonti-

nens, og *Pants* Super for tung inkontinens. De er alle laget av 100% pustende materiale, som gjør at produktet føles mindre fuktig og varmt mot huden. Dette bidrar også til å forebygge og redusere eventuelle hudproblemer. Myk midjeelastikk, lekkasjesperrer rundt bena og god passform gir maksimal komfort og beskyttelse. FeelDry™ gjør at overflaten føles tørr og behagelig. TENA *Pants* Discreet har også Odour Control™, som hemmer utviklingen av lukt.

Nyttig å vite

TENA *Pants* krever ikke ytterligere fiksering. Etter bruk, rull produktet sammen og fest med tapen på baksiden. Enkelt og hygienisk.

TENA *Pants* er godkjent på blå resept.



NAF nr.	Art.nr.	Produktnavn	Absorpsjonsevne	Livvidde	Fargekode	Antall Pose/Kart.	Godkjent av NAV
901316	792100	TENA <i>Pants</i> Discreet Medium	3	75-100 cm		12/96	Ja
921192	793100	TENA <i>Pants</i> Discreet Large	3	95-125 cm		10/80	Ja
975235	790901	TENA <i>Pants</i> Plus X-Small	4	50-70 cm		11/44	Ja
983957	791002	TENA <i>Pants</i> Plus Small	4	65-85 cm		14/56	Ja
983965	791102	TENA <i>Pants</i> Plus Medium	4	80-110 cm		14/56	Ja
983973	791202	TENA <i>Pants</i> Plus Large	4	100-135 cm		14/56	Ja
921371	791302	TENA <i>Pants</i> Plus X-Large	4	120-170 cm		12/48	Ja
901581	791060	TENA <i>Pants</i> Super Small	5	65-85 cm		12/48	Ja
913396	791160	TENA <i>Pants</i> Super Medium	5	80-110 cm		12/48	Ja
936319	791260	TENA <i>Pants</i> Super Large	5	100-135 cm		12/48	Ja

TENA Comfort

Middels/tung inkontinens

I bruk

TENA Comfort tilhører den gamle generasjonen av inkontinensprodukter. Av hensyn til økt komfort for brukere og bedre arbeidsstillinger for personalet, anbefaler vi å bytte til TENA Flex eller TENA Pants i de tilfeller der det er mulig. Ved sivende avføring eller tilfeller hvor det må skiftes spesielt ofte, anbefaler vi å fortsette med TENA Comfort.

TENA Comfort fikseres med TENA Fix Bomull Special eller TENA Fix Nettingtruse.

Produktegenskaper

TENA Comfort finnes i fem ulike absorpsjonsnivåer. FeelDry™ overflaten bidrar til at bleien føles tørr og trygg. For distribusjon gjennom apotek og bandagist er det tatt frem en pustende variant.

Nyttig å vite

TENA Comfort har våtindikator som endrer farge fra gul til blå når det er på tide å skifte produkt.



NAF nr.	Art.nr.	Produktnavn	Absorpsjonsevne	Fargekode	Antall Pose/Kart.	Godkjent av NAV
922291	752758	TENA Comfort Normal (Breathable)	4	Orange	40/120	Ja
914235	752820	TENA Comfort Plus (Breathable)	5	Blå	40/80	Ja
937042	752920	TENA Comfort Extra (Breathable)	6	Gul	34/68	Ja
816855	758128	TENA Comfort Super (Breathable)	7	Grønn	28/56	Ja
899157	759126	TENA Comfort Maxi (Breathable)	8	Lilla	26/52	Ja
	752700	TENA Comfort Normal	4	Orange	42/126	
	752850	TENA Comfort Plus	5	Blå	46/92	
	752950	TENA Comfort Extra	6	Gul	40/80	
	758053	TENA Comfort Super	7	Grønn	30/60	
	759056	TENA Comfort Maxi	8	Lilla	28/56	
	761420	TENA Comfort Mini Plus	5	Blå	28/168	
	761520	TENA Comfort Mini Extra	6	Gul	28/224	
	761723	TENA Comfort Mini Super	7	Grønn	28/168	

TENA Slip

Middels/tung inkontinens

I bruk

Alt-i-ett bleier som TENA Slip tilhører den gamle generasjonen inkontinensprodukter, og brukes ved tung urin- og/eller avføringsinkontinens i de tilfeller ingen andre produkter fungerer tilfredsstillende. For å oppnå mer komfort for bruker og bedre arbeidsforhold for personalet, anbefaler vi å bruke mindre og mer komfortable pustende produkter, som TENA Flex eller TENA Pants. TENA Slip har FeelDry™ overflate som gjør at produktet føles tørt på overflaten.

Produktegenskaper

TENA Slip finnes i 3 ulike absorpsjonsnivåer. Produktet er selvfikserende og har tape som kan festes og løsnes flere ganger.

Nyttig å vite

TENA Slip XS er beregnet på større barn med inkontinens. Alternativt kan TENA Pants Plus XS eller Libero Night Comfort brukes. TENA Slip har våtindikator som endrer farge fra gul til blå når det er på tide å skifte produkt.

TENA Slip Plus og Super er godkjent på blå resept.



NAF nr.	Art.nr.	Produktnavn	Absorpsjons- evne	Livvidde	Farge- kode	Antall Pose/Kart.	God- kjent av NAV
901597	713030	TENA Slip Plus X-Small	👉👉👉	50-75 cm		30/90	Ja
921383	710133	TENA Slip Plus Small	👉👉👉	60-85 cm		30/90	Ja
913537	710233	TENA Slip Plus Medium	👉👉👉	80-120 cm		30/90	Ja
936442	710333	TENA Slip Plus Large	👉👉👉	90-145 cm		30/90	Ja
937191	714128	TENA Slip Super S	👉👉👉	60-85 cm		28/84	Ja
875945	714228	TENA Slip Super M	👉👉👉	80-120 cm		28/84	Ja
953041	714328	TENA Slip Super L	👉👉👉	90-145 cm		28/84	Ja
	710510	TENA Slip Maxi S	👉👉👉	60-85 cm		24/72	
	710511	TENA Slip Maxi M	👉👉👉	80-120 cm		24/72	
	715324	TENA Slip Maxi L	👉👉👉	90-145 cm		24/72	

TENA Fix

Truser

TENA Fix Bomull Special

TENA Fix Bomull Special er en tykk og god bomullstruse med ben. Den er myk og behagelig, har bred elastikk rundt livet og lårene, og ekstra elastikk i skrittet. Derfor er den spesielt egnet for fiksering av inkontinensprodukter. TENA Fix Bomull Special er enkeltpakket, og kan brukes av både menn og kvinner. Kan vaskes opptil 100 ganger på 95°C. Godkjent på blå resept.

TENA Fix nettingtruser

TENA Fix nettingtruser kan brukes til å fikse alle TENA inkontinensprodukter. Produktet holdes godt på plass, og trusen føles ikke stram rundt lårene. TENA Fix nettingtruser kan brukes av både kvinner og menn, og kan vaskes ca. 20 ganger på 70°C. Må ikke tørkes i tørketrommel. TENA Fix nettingtruser er godkjent på blå resept.

Standard nettingtruse

Er noe tynnere og litt mindre elastisk enn TENA Fix nettingtruser. Finnes i 3 størrelser, og dekker livmål fra 65-140 cm.

Basic nettingtruser med ben

Basic nettingtruser er tynne, enkle fikseringstruser med ben, som kan brukes til å fikse alle TENA inkontinensprodukter. Den kan brukes av både kvinner og menn, og kan vaskes ca. 20 ganger på 70°C. Må ikke tørkes i tørketrommel.



NAF nr.	Art.nr.	Produktnavn	Livvidde	Fargekode	Antall Pose/Kart.	Godkjent av NAV
996629	756701	TENA Fix Bomull Special S/M	60-90 cm		1/32	Ja
996637	756801	TENA Fix Bomull Special L/XL	90-120 cm		1/28	Ja
996645	756901	TENA Fix Bomull Special XX-Large	110-140 cm		1/24	Ja
838904	754430	TENA Fix nettingtruse Small	60-85 cm		5/100	Ja
	754400	TENA Fix nettingtruse Small	60-85 cm		25/200	
838912	754530	TENA Fix nettingtruse Medium	70-100 cm		5/100	Ja
	754500	TENA Fix nettingtruse Medium	70-100 cm		25/200	
838920	754630	TENA Fix nettingtruse Large	80-120 cm		5/100	Ja
	754600	TENA Fix nettingtruse Large	80-120 cm		25/200	
838946	754730	TENA Fix nettingtruse X-Large	95-130 cm		5/100	Ja
	754700	TENA Fix nettingtruse X-Large	95-130 cm		25/200	
	755400	Standard nettingtruse Small			100	
	755500	Standard nettingtruse Medium			100	
	755611	Standard nettingtruse Large			100	
	768401	Basic nettingtruse Small	50-75 cm		200	
	768501	Basic nettingtruse Medium	70-90 cm		200	
	768601	Basic nettingtruse Large	85-110 cm		200	
	768701	Basic nettingtruse X-Large	105-150 cm		200	
810903	764430	TENA Fix bomullstruse dame Small			5/50	
810895	764530	TENA Fix bomullstruse dame Medium			5/50	
810887	764630	TENA Fix bomullstruse dame Large			5/50	

TENA hygieneprodukter

Rengjøring og velbehag

TENA Wash Cream

Dette milde alternativet til såpe og vann rengjør, gjenoppbygger og beskytter selv den mest ømfintlige hud. Ideell for hyppig vask og inkontinenspleie. Gjør like rent som riktig bruk av såpe og vann, og behøver ikke skylles bort.

TENA Wash Glove

En myk og praktisk vaskehanske. Utsiden består av et mykt materiale som egner seg godt også for vask av ømfintlig hud. Innsiden består av latexfri plast.

TENA Wet Wipe

Ekstra myke og tykke våtservietter laget spesielt for intimvask. Nye TENA Wet Wipe er dermatologisk testet og dokumentert for sin hudvennlighet. Våtserviettene, som kan brukes på hele kroppen, bidrar til kvalitetspleie og forenkler vaskerutinene for pleiepersonell og inkontinente. Nye TENA Wet Wipe inneholder ikke parabener og er alkoholfrie. De inneholder både vitamin E og Aloe Vera, som hjelper til å gjenoppbygge og beskytte huden. Fås både i pakker med 10 og 48 stk.

TENA Cellduk

En vaskeklut bestående av cellulose og nylontråder, som gjør den sterk også i våt tilstand. Denne myke og stofflignende vaskekluten kan brukes sammen med såpe og vann, vaskekrem eller olje.

TENA Shampoo & Shower

En mild sjampo og dusjsåpe som også egner seg for ømfintlig hud. Kondisjonierende ingredienser gjør håret mykt og lett å gre ut. Svir ikke i øynene.

TENA Liquid Soap

En mild, flytende såpe som også egner seg godt for tørr hud. Ideell for daglig bruk. Brukes sammen med vann, påfør og skyll av.



TENA Hudpleie

NAF nr.	Art.nr	Produktnavn	Størrelse	Antall Pose/Kart.
814939	2057	TENA Wash Cream	250 ml	10
814947	2059	TENA Wash Cream m/pumpe	500 ml	10
816579	2061	TENA Wash Cream m/pumpe	1000 ml	6
806018	740500	TENA Wash Glove	16x25 cm	175/1050
852471	2518	TENA Wet Wipe 48-pakning	20x32 cm	48/576
873123	2565	TENA Wet Wipe 10-pakning	20x32 cm	10/600
869032	744000	TENA Cellduk	25x26 cm	200/1600
913876	744200	TENA Cellduk	25x33 cm	200/1200
879057	2233	TENA Shampoo & Shower	500 ml	10
839450	2215	TENA Liquid Soap	500 ml	10

TENA hudpleieprodukter

Fuktighet og beskyttelse

TENA Skin Cream

Inneholder vitamin E og naturlige fuktighetsbevarende ingredienser, som gjør huden myk og smidig. Godt egnet for tørr og sensitiv hud, og trekker lett inn i huden. Finnes i to varianter, med og uten parfyme.

TENA Skin Lotion

Inneholder naturlige fuktighetsbevarende stoffer, som gjør huden myk og smidig. Den er behagelig parfymert, og er godt egnet for tørr og sensitiv hud.

TENA Skin Care Oil

Inneholder vitamin E og er fri for konserveringsmidler. Lindrende olje som skånsomt rengjør og mykgjør selv den mest ømfintlige hud. Brukes direkte på huden eller i badevannet. Fordeler seg i vannet og perler ikke.

TENA Zinc Cream

Denne lindrende salven er ideell for tørr, sprukket og irritert hud. Inneholder pleiende oljer, vitamin E og sink. Inneholder ikke konserveringsmidler. Trekker lett inn i huden. Påfør et tynt lag på utsatte områder. Inneholder 10% sink.

TENA Barrier Cream

Denne milde salven er vannavvisende og fungerer som en beskyttende barriere. Godt egnet ved sårhet og inkontinenspleie. Inneholder ikke konserveringsmidler. TENA Barrier Cream er sink fri, og føles ikke klebrig. Påfør et tynt lag på huden.



TENA Hudpleie

NAF nr.	Art.nr.	Produktnavn	Størrelse	Antall Pose/Kart.
887497	1974	TENA Skin Cream m/parfyme	150 m	10
887687	1976	TENA Skin Cream u/parfyme	150 ml	10
936735	1954	TENA Skin Lotion	250 ml	10
816598	1956	TENA Skin Lotion m/pumpe	500 ml	10
868031	1964	TENA Skin Care Oil	250 ml	10
887729	1978	TENA Zinc Cream	100 ml	10
898956	1962	TENA Barrier Cream	150 ml	10

TENA beskyttelse

Senge- og stolbeskyttelse

TENA Bed

Sengebeskyttelsen brukes i tillegg til et inkontinensprodukt, når risikoen for lekkasje til seng er stor. TENA Bed har god absorpsjon, og er myk og behagelig å ligge på. De forseglede kantene gjør at væsken ikke trekker over kanten og ned på lakenet. Plasseres oppå lakenet, eller i stol ved behov.

TENA stikklaken

Dette er beskyttelse som brukes i seng, som erstatter tekstilt stikklaken og blå plast. De dekker en stor del av sengen, og kan plasseres både over og under lakenet. Produktet har bakside av plast og parafinbehandlede kanter som hindrer lekkasje. Finnes i tre forskjellige størrelser.

TENA hygienelaken

Et stikklaken med ekstra myk overflate og god absorpsjon, som kan erstatte både tradisjonelle stikklaken og kladder. Etter hvert som bleiene stadig blir bedre, bør man unngå unødvendig bruk av løse produkter i sengen.

TENA stolbeskyttelse

Dette er tynn og diskret beskyttelse for stoler. Tape


på baksiden av produktet gjør at det holdes på plass i stolen. Kan også brukes i rullestoler.

TENA smekker

Våre smekker har knytebånd som festes rundt halsen, og består av tre lag; en utside som ser ut som en serviett, et mellomlag av plast som hindrer gjennomsløsing, og en myk bakside av papir som etter måltidet kan brukes som serviett. Smekken har lomme som samler opp matrester og drikke uten at brukeren blir tilsølt.

Maxi-bleie

Maxi-bleien er en rektangulær bleie uten plast, som eventuelt kan brukes som innleggsbleie i de tilfeller det er behov for ekstra absorpsjon.

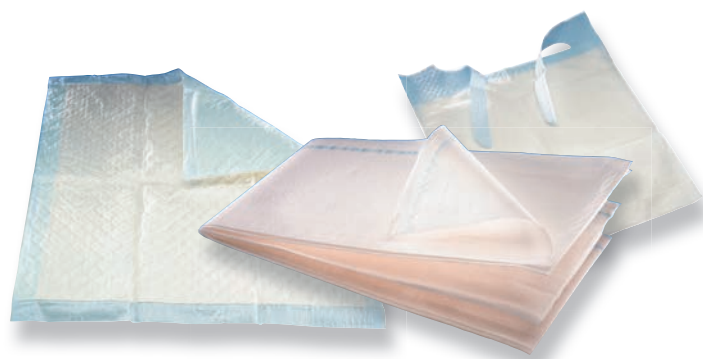

NAF nr.	Art.nr.	Produktnavn	Størrelse	Antall Pose/Kart.	Godkjent av NAV
	771170	TENA Bed Normal fersken	60x60 cm	160	
	771171	TENA Bed Normal fersken	60x90 cm	100	
	771000	TENA Bed Plus 75g blå	60x60 cm	120	
	771030	TENA Bed Plus 75g blå m/ innerpose	60x60 cm	30/120	
	773500	TENA Bed Plus 85g	60x75 cm	90	
	773680	TENA Bed Plus 110g blå	60x90 cm	80	
	773620	TENA Bed Plus 110g blå m/innerpose	60x90 cm	20/80	
901321	773641	TENA Bed Plus Friction 110g gul	60x90 cm	20/80	Ja
	774200	TENA stikklaken	85x140 cm	80	
	774400	TENA stikklaken	85x175 cm	80	
	774850	TENA stikklaken	80x210 cm	100	
	784430	TENA hygienelaken	85x160 cm	25/75	
	775400	TENA beskyttelsesunderlag	75x210 cm	150	
922604	720511	TENA Bibs Smekke S/M	37x48 cm	150/900	
903424	720611	TENA Bibs Smekke M/L	37x68 cm	150/900	
914706	753900	Maxi-bleie u/plast	15x57 cm	40/160	Ja

Libresse og Libero

Sanitetsbind og barnebleier

Libresse

Libresse sanitetsbind og truseinnlegg er markedsledende i Norge. Libresse bind med SecureFit har en passform som føyer seg etter kroppen. Dette gjør bindet meget lekkasjesikkert. Libresse bind med SecureFit fås i normal tykkelse og ultra tynne.

Libero

Libero barnebleier har høy sugeevne kombinert med unik passform og elastikk. De har lekkasjesperre i sidene og en tekstillignende overflate. Libero festes med borrelås som kan løsnes og festes mange ganger, og er beregnet for både jenter og gutter. Størrelsene Midi, Maxi, Maxi+, XL, XL+ og alle

Up&Go varianter er godkjent på blå resept.

Libero Night Comfort finnes i to forskjellige størrelser, og er beregnet for sengevætere og handikappede barn. Dekker størrelser mellom 20 og 60 kg.

Swimpants

Libero Swimpants holder tett, men tiltrekker seg mindre vann enn vanlige bleier, slik at bleiebarn mister mindre oppdrift ved bading. Tilgjengelig på blå resept.



NAF nr.	Art.nr.	Produktnavn	Størrelse	Antall Pose/Kart.	Godkjent av NAV
818633	4672	Libresse Maxi Normal		18/180	
818302	4673	Libresse Maxi Normal Clip		14/140	
992693	5814	Libresse Truseinnlegg Normal		32/480	
818237	8821	Libresse Invisible Normal Clip		14/224	
818175	8875	Libresse Maxi Goodnight		10/120	
	2661	Libero Baby	<1,2kg	50/600	
883009	2713	Libero Baby	<2kg	24/288	
900841	2780	Libero Baby Soft Newborn 1	2-4kg	28/140	
882019	2743	Libero BabySoft Mini 2	3-6kg	46/184	
902332	2350	Libero BabySoft 3	5-8kg	33/132	Ja
921845	2560	Libero Comfort Fit 4	7-14kg	29/174	Ja
913883	2570	Libero Comfort Fit 5	10-16kg	27/162	Ja
936744	2580	Libero Comfort Fit 6	12-22kg	25/150	Ja
816606	3359	Libero Comfort Fit 7	15-30kg	22/132	Ja
903185	3066	Libero Swimpants Small	7-12kg	6/36	Ja
914354	3069	Libero Swimpants Medium	10-16kg	6/36	Ja
898962	2274	Libero UP&GO 5	10-14kg	22/88	Ja
868036	2275	Libero UP&GO 6	13-20kg	20/80	Ja
839455	2278	Libero UP&GO 7	16-26kg	18/72	Ja
902330	4632	Libero Night Comfort Medium	20-37kg	15/60	Ja
921843	4639	Libero Night Comfort Large	35-60kg	12/48	Ja

TENA produktoversikt

<i>for Men</i>																
<i>Lady</i>																
<i>Pants</i>																
<i>Flex</i>																
<i>Comfort</i>																
<i>Slip</i>																

Alle våre produkter er refusjonsberettigede pr. 01.01.2010, med unntak av TENA Lady Mini Magic og TENA Slip Maxi.